



DESIFOR- PLEXIFEE

Flächendesinfektion, Alle Oberflächen, begrenzt viruzid PLUS, Gebrauchsfertig

Einsatzbereich

Zur Desinfektion aller Oberflächen in Bereichen Lebensmittel, öffentliche Einrichtungen sowie Einrichtungen des Gesundheitswesens. DEKRA-bestätigte Materialverträglichkeit für Acrylglas (z. Bsp. Fitnessgeräte, Sonnenbänke).

Anwendung

Fläche mit DESIFOR-PLEXIFEE Lösung wischen bzw. flächendeckend auftragen. Flächen, Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Technische Informationen

Karton mit 20 Fl. à 500 ml
Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 20593
Art.-Nr. 20594


Wirkstoffe

100 g enthalten 0,09 g 2-Phenoxyethanol, 0,1 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride und 0,09 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): keine

BAuA Reg.-Nr. N-86838

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.  0420

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Humanmedizinischer Bereich, bakterizid und levurozid	konz. 15 Min.	VAH/DGHM
Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen, bakterizid und levurozid	konz. 5 Min.	EN 1276 hohe Belastung; EN 1650 hohe Belastung; EN 13697 hohe Belastung
Tuberkulozid (M. terrae)	konz. 60 Min.	EN 14348 hohe Belastung
begrenzt viruzid	konz. 5 Min.	DVV/RKI
begrenzt viruzid PLUS	konz. 60 Min.	EN 14476 hohe Belastung

Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Influenza)
- Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Rota-, Noro- u. Adenoviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Excellente Reinigungseigenschaft
- Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett
- Haltbarkeit geöffnet: 12 Monate
- DEKRA-zertifizierte Materialverträglichkeit für Acrylglas
- Kennzeichnungsfrei (nach GHS)

Hinweise

Materialverträglichkeit vorab an unauffälliger Stelle prüfen.
Sicherheitsdatenblatt beachten.

pH conc 

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE