



# DESIFOR-QUICK wipes

**Oberflächendesinfektion – gebrauchsfertige Feuchttücher zur Reinigung und Desinfektion, begrenzt viruzid, Tücher biologisch abbaubar**

## Einsatzbereich

Zur rückstandsfreien Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im medizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen. Nur für den professionellen Gebrauch.

## Anwendung

Zu desinfizierende, saubere Fläche mit dem getränkten Tuch gründlich wischen und abtrocknen lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Einwirkzeit beachten.

## Technische Informationen

Karton mit 12 Flowpacks à 80 Tücher Art.-Nr. 20610

## Wirkstoffe

100 g enthalten 63,1 g 2-Propanol; 2,9 g Ethanol.  
Verpackung nur völlig restentleert in das Duale System einbringen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Restmengen bestimmungsgemäß entsorgen.  
Sicherheitsdatenblatt beachten.

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): GHS02, GHS07

BAuA Reg.-Nr. N-91510

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Humanmedizinischer Bereich, bakterizid und levurozid	konz. 5 Min.	EN 13727, EN 13624, EN 16615 hohe und niedrige Belastung
Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen, bakterizid und levurozid	konz. 1 Min.	EN 1276, EN 1650, EN 13697 hohe und niedrige Belastung EN 1276, EN 1650, EN 16615 hohe und niedrige Belastung
	konz. 1 Min.	
Tuberkulozid (M. terrae)	konz. 30 Sek.	EN 14348 hohe und niedrige Belastung
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	konz. 15 Sek.	DVV/RKHeitlinie
Rotaviren	konz. 30 Sek.	EN 14476 ohne Belastung
Noroviren (MNV)	konz. 30 Sek.	EN 14476 niedrige Belastung

## Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Influenza)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaft
- Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett
- Haltbarkeit geöffnet: 28 Tage
- Gebrauchsfertige Tücher (EN 16615, 4-Felder-Test)
- HACCP-konform

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. ☎ 0620

pH conc 

0	2	4	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
Taunusstraße 19 · 80807 München  
Tel. +49 89 3506080  
info@dr-schnell.de  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE