

# WERO Wund- und Heilsalbe

MEDIZINPRODUKT

WERO Wund- und Heilsalbe ist eine Salbe zur äußerlichen Anwendung für die Heilung von Verletzungen der Haut.

- ✓ **Fördert die Wundheilung**
- ✓ **Reduziert die Schwellung**
- ✓ **Mindert den Schmerz**
- ✓ **Reduziert die Narbenbildung**
- ✓ **Beugt Infektionen vor**
- ✓ **Für Kinder geeignet**

**Anwendungsgebiete:** Verletzungen der Haut (z.B. Schnitt-, Schürf-, Riß- und Quetschwunden), Verbrennungen 1. und 2. Grades (auch bei Sonnenbrand), zur Behandlung von Narbengewebe und stumpfen Traumen. Auch zur Pflege der beanspruchten oder trockenen, rissigen Haut und Altershaut.

**Eigenschaften:** Die WERO Wund- und Heilsalbe dient zur Einstellung eines optimalen physikalischen Milieus zur Heilung verletzter Haut. Dadurch werden Blutergüsse und Ödeme beschleunigt abgebaut, die Schwellung reduziert und damit die Schmerzen gelindert. Die Neubildung von Gewebe wird unterstützt, die Heilung nach Operationen oder Verletzungen (Wunden, Verbrennungen, Sonnenbrand) verbessert und die Narbenbildung verringert.

**Anwendung:** Vor und nach der Behandlung Hände waschen. Sofern erforderlich, die Wunde reinigen (z.B. Werolin® Wundreinigungsspray). WERO Wund- und Heilsalbe ca. 2 mm dick auf die verletzte Haut bis ca. 2 cm über die Wundränder hinaus auftragen. In den ersten drei Tagen nach der Verletzung mehrmals täglich anwenden.

WERO Wund- und Heilsalbe kann auch in Verbindung mit einem handelsüblichen Verbandstoff angewandt werden. Durch das Abdecken der verletzten Haut mit einem Verbandstoff wird die Wunde zusätzlich vor äußeren Einflüssen geschützt, die die Heilung stören könnten.

WERO Wund- und Heilsalbe enthält keine hautreizenden Substanzen und kann am Mund- und im Schleimhautbereich (z.B. Nase) angewendet werden.

**Dauer der Anwendung:** Die Anwendung richtet sich nach Art und Schwere der Verletzung.

**Kontraindikation und Nebenwirkungen:** Bei bekannter Allergie oder Verdacht allergischer Reaktionen auf einen der Inhaltsstoffe sollte das Produkt nicht eingesetzt werden. Bei Verbrennungen des Grades 2b sollte ein Arzt hinzugezogen werden. Die Anwendung bei Schwangeren, Stillenden, Säuglingen und Kleinkindern sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

**Sicherheitshinweise:** Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht einnehmen. Auf hygienische Entnahme achten. Vor Frost und Hitze schützen. Tube nach Gebrauch verschließen. Nur einwandfreie und unbeschädigte Gebinde verwenden. Vor Kindern sicher aufbewahren. Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. Nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden. Temperaturbegrenzung beachten. Trocken aufbewahren. Gebrauchsanweisung beachten. Auf unbeschädigte Versiegelung achten.

**WERO**

# WERO Wund- und Heilsalbe

**MEDIZINPRODUKT**

**Haltbarkeit:** 3 Jahre nach Herstellung

**Aufbrauchfrist:** Nach dem Öffnen sollte WERO Wund- und Heilsalbe innerhalb von 3 Monaten aufgebraucht werden.

**Packungsgröße:** 20 g Tube

**Chargenbezeichnung / [LOT]:** auf Boden der Faltschachtel aufgedruckt und in Kunststofftubenfalz eingeprägt

**Verfalldatum / **: auf Boden der Faltschachtel aufgedruckt und in Kunststofftubenfalz eingeprägt

**Inhaltsstoffe (INCI):** Aqua purificata, Octyldodecanol, Hydrogenated Palm Glycerides, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Cetyl Alcohol, Methylparaben [and] Propylparaben [and] Sorbic Acid [and] Dehydroacetic Acid, Trace elements [zinc, iron]



Inhalt: **20 g e**

REV 012021

Vertrieb durch:

**WERO** GmbH & Co. KG · Idsteiner Str. 94 · D-65232 Taunusstein

Telefon +49 [0] 6128 9757-0 · Telefax +49 [0] 6128 9757-50 · E-Mail: [info@wero.de](mailto:info@wero.de) · [www.wero.de](http://www.wero.de)

 **NAWA** Heilmittel GmbH · Ostendstrasse 100 · D-90482 Nürnberg

Telefon: +49 [0] 911-544 41-0 · Telefax: +49 [0] 911-544 41-11 · E-Mail: [info@nawa.com](mailto:info@nawa.com)