



Antigenschnelltest für die Veterinärmedizin

CAV - Canine Adenovirus

Anwendung: Canine

Artikelnummer: 9236052

Es gibt mehrere Adenovirus-Stämme, aber nur zwei Arten sind häufig vorkommend. Die erste Art wird als Hunde-Adenovirus Typ 1 (CAV-1) und die zweite Art als Hunde-Adenovirus Typ 2 (CAV-2) bezeichnet. Beide Stämme verbreiten sich schnell, die daraus resultierenden Krankheiten sind jedoch sehr unterschiedlich.

TESTPRINZIP

Das CAV-Antigen-Schnelltestkit verwendet einen chromatographischen Immunoassay zum qualitativen Nachweis von Canine-Adenovirus-Antigen in Konjunktiva. Die zu testende Probe wird auf die Probenvertiefung (S) der Testkassette aufgetragen und durchfeuchtet durch Kapillarwirkung den Teststreifen. Eine farbige Linie erscheint im Kontrolllinienbereich (C) und zeigt eine korrekte Testausführung an. Im Falle eines positiven Testergebnisses erscheint eine farbige Linie im Testlinienbereich (T).

VOR DEM GEBRAUCH BEACHTEN

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht als alleinige Grundlage zur Diagnose. Berücksichtigen Sie sämtliche klinische Informationen.
- Den Test nicht nach Ablauf des auf dem versiegelten Beutel angegebenen Verfallsdatum verwenden.
- Lesen Sie alle Informationen in dieser Gebrauchsanweisung, bevor Sie den Test durchführen.
- Die Testkassette sollte bis zur Verwendung im versiegelten Beutel verbleiben.
- Behandeln Sie alle Proben als potentiell infektiös. Beachten Sie während des gesamten Tests bewährte Vorsichtsmaßnahmen.
- Entsorgen Sie alle gebrauchten Einzelkomponenten des Tests

1

gemäß den örtlichen Bestimmungen.

- Nur zum einmaligen Gebrauch geeignet, verwenden Sie für einen weiteren Test eine neue Testkassette.
- Die Testkassette muss während des gesamten Testvorgangs waagrecht auf einer geraden Oberfläche verbleiben.

MITGELIEFERTE MATERIALIEN

- Testkassette
- Probenentnahmetupfer
- Pufferröhrchen und Probenpuffer
- Tropfverschluss
- Gebrauchsanweisung

AUFBEWAHRUNG UND STABILITÄT

1. In der Verpackung und im versiegelten Beutel bei Raumtemperatur oder gekühlt zwischen 4°C und 30 °C aufbewahren.
2. Der Test ist bis zum auf dem versiegelten Beutel angegebenen Verfallsdatum haltbar.

PROBENSAMMLUNG UND TESTDURCHFÜHRUNG

1. Verwenden Sie den Probenentnahmetupfer um eine Probe Konjunktiva zu entnehmen. Führen Sie einen Konjunktivalabstrich am Auge des Tieres durch, indem Sie das Unterlid anheben oder abziehen und mit mittelfestem Druck eine möglichst hohe Benetzung des Probenentnahmetupfers mit Bindehautzellen erreichen.




2

2. Führen Sie den Probenentnahmetupfer mit der zuvor entnommenen Probe in das mit Probenpuffer befüllte Pufferröhrchen ein. Rollen und drehen Sie den Tupfer mindestens 5-mal, während Sie den Tupferkopf gegen die Innenseite und Boden des Pufferröhrchens drücken. Entfernen Sie den Probenentnahmetupfer, während Sie mit den Fingern das


Pufferröhrchen zusammendrücken und pressen Sie dabei die Lösung so gut wie möglich aus dem Tupferkopf heraus.



3. Verschließen Sie das Pufferröhrchen mit dem Tropfverschluss.

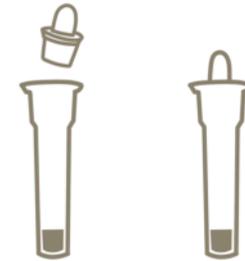

4. Lassen Sie die Testkassette und die Probe Raumtemperatur (15 – 30 °C) erreichen, bevor Sie den Test durchführen. Nehmen Sie die Testkassette aus dem versiegelten Beutel und legen Sie ihn auf eine gerade Oberfläche, während Sie 5 Tropfen der Testprobe auf die Probenvertiefung (S) der Testkassette geben.

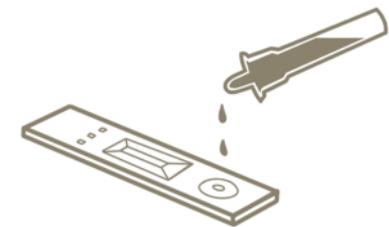

5. Stellen Sie den Timer auf 10 Minuten. Innerhalb dieser Zeit können Sie die Kapillarwirkung des Teststreifens im Sichtfenster der Testkassette beobachten. Wenn keine Kapillarwirkung zu beobachten ist, drücken Sie vorsichtig mit der Spitze des

3


Tropfverschluss in die Probenvertiefung (S) der Testkassette, um den Flüssigkeitsfluss zu unterstützen.

Lesen Sie das Testergebnis nach Ablauf des Timers ab.



6. Führen Sie nach 15 Minuten keine Interpretation des Testergebnisses mehr durch.

TESTERGEBNIS

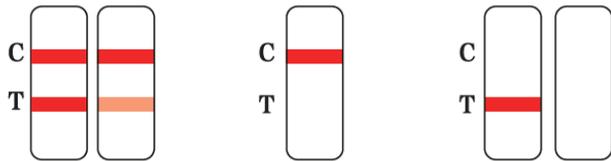

Ergebnis 1:Positiv

Ergebnis 2:Negativ

Ergebnis 3:Ungültig

Positiv: Die farbige Kontrolllinie (C) und farbige Testlinie (T) erscheinen. Das entsprechende Antigen wurde nachgewiesen.

Negativ: Die farbige Kontrolllinie (C) erscheint, im Testbereich (T) erscheint keine farbige Linie. Es wird kein Antigen nachgewiesen.

Ungültig: Die farbige Kontrolllinie (C) erscheint nicht.

Häufige Ursachen für ein ungültiges Ergebnis sind ein unzureichendes Probenvolumen oder falsche Verfahrenstechniken. Überprüfen Sie die Testprozedur und wiederholen Sie den Test mit einer neuen Testkassette. Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie die Verwendung des Testkits ein und wenden Sie sich an Ihren Händler.

QUALITÄTSKONTROLLE

Eine verfahrenstechnische Kontrolle ist im Test inbegriffen. Die farbige Linie im Kontrollbereich (C) wird als interne Verfahrenskontrolle betrachtet. Sie bestätigt ein ausreichendes Probenvolumen, eine ausreichende Membrankapillarkraft und eine korrekte Verfahrenstechnik.

BESCHRÄNKUNGEN

- Verwenden Sie den Test nicht, wenn der versiegelte Folienbeutel der Testkassette beschädigt ist. Nach dem Öffnen des versiegelten Beutels sollte der Test innerhalb einer Stunde durchgeführt werden. Längerer Kontakt mit heißer und feuchter Umgebung führt zu Produktverschlechterungen.
- Die gesammelte Probe sollte so schnell wie möglich getestet werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Probe korrekt entnommen und extrahiert wurde, um falsche Ergebnisse zu vermeiden.
- Vermeiden Sie eine Blasenbildung, wenn Sie die Probe auf die Testkassette geben.
- Den Test nicht nach Ablauf des auf dem versiegelten Beutel angegebenen Verfallsdatum verwenden.
- Verwenden oder mischen Sie keine Pufferlösung aus einem anderen Testkit.

FAQ

Welche Einschränkungen hat dieses Produkt?

Das Reagenz ist ein qualitativer Test, der Antigen mit hoher Leistung nachweisen kann. Wenn die Probe jedoch mangelhaft ist oder die Antigenkonzentration unter der Nachweisgrenze liegt, können negative Ergebnisse auftreten. Zur Bestätigung der Diagnose sollte ein weiterer klinischer Ansatz in Betracht gezogen werden.

Wie ist die Sensitivität dieses Produkts?

Im Vergleich zu anderen vergleichbaren Schnelltests zeigte dieses Testkit eine Antigensensitivität von > 99 %, es wurden keine Kreuzreaktion mit Coronavirus, Staupevirus oder Parvovirus beobachtet.

Weitere Informationen, Service und Bestellung

Tel: +49 2151 9345610

Email: info@medikay.de

Web: www.medikay.de

| Symbol Index | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|--|---------------------------|
| | Gebrauchsinformation beachten | | Inhalt | | Vor Licht schützen |
| | Nur für eine professionelle Nutzung | | Chargennummer | | Vor Feuchtigkeit schützen |
| | Nur zum Einmalgebrauch | | Verfallsdatum | | Hersteller |
| | | | Lagertemperatur | | |

Version No.: 1.3.7

Datum: 05.06 2023

MEDIKAY
Professional Diagnostics