



Quick DES Wipes N

Alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

- Universelle, komfortable und zeitsparende Anwendung
- Umfassende, schnelle Wirksamkeit
- Besonders geeignet zur Desinfektion von großen Flächen in patientennahen Bereichen



VAH gelistet

Präparatetyp

Quick DES Wipes N sind alkoholische, gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen in patientennahen Bereichen. Quick DES Wipes N bieten bei der Desinfektion und Reinigung von großen Flächen eine universelle und zeitsparende Anwendung. Die Tücher lassen sich einzeln aus dem gewohnten Vliestuchspender mit wiederverschließbarem Deckel entnehmen.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol

Chemisch-physikalische Daten

pH-Wert: 5,5 - 6,5
 Flammpunkt: 24°C

Anwendungsgebiete

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR):
 Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem, medizinischem Inventar und Flächen aller Art, vorwiegend in patientennaher Umgebung.

Gem. EU-Medizinprodukteverordnung:
 Schnelldesinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten, insbesondere auch für empfindliche Flächen von Medizinprodukten.
 Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/ Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendung

Flächen mit Safeline Quick Des Wipes N bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.
 Quick DES Wipes N sind vorgesehen für die Verwendung von wieder befüllbaren Tuchspendersystemen. Angaben zur Befüllung und Aufbereitung der Tuchspendersysteme sind zu beachten. Nach jeder Tuchentnahme ist das Tuchspendersystem unmittelbar wieder zu verschließen.

Anwendungshinweis

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 28 Tage

Einwirkzeiten

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion:

bakterizid, levurozid:	2 min
tuberkulozid:	30 s
mykobakterizid:	1 min
begrenzt viruzid:	30 s
begrenzt viruzid PLUS:	3 min

Lieferformen

Einzelpackung	Verkaufseinheit	Ref.-No.
Dose à 90 Tücher	1 x 1 Dose	09930-N
Nachfüllpack à 90 Tücher	1 x 1 Beutel	09931-N

Quick Des Wipes N: baua: Reg.-Nr. N-97773

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:



Achtung

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten.
 Nicht rauchen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.
 Nur zur professionellen Anwendung.



AMPri
 AMPri Handelsgesellschaft mbH
 Benzstr. 16 • 21423 Winsen (Luhe) • Germany
 Tel. +49 (0)4171- 8480-0 • www.ampri.de • info@ampri.de



bioSight GmbH
 Brasselsbergstr. 3 • 34132 Kassel • Tel.: +49 (0)561 81678111